

※こちらから
景田田景

小型イヤホン

電話時に耳穴に
入れて使える

片耳イヤホン

ACTIVE COMMUNICATION TOOL

EARLIS

BLACK

ELPA
AS-EM03

ELPA
AS-EM03

保証書在中

特長


- 本品は集音器イヤリス(AS-P001)専用の電話用イヤホンマイクです。
- 集音器イヤリスを使用しながら自然な持ち方で電話ができます。
- イヤホンとマイクが分離しているのでハウリング(ピーピー音)の心配がありません。

各部の名称とご使用方法

■イヤピースの調整


本機にはあらかじめ(M)サイズのイヤピースが装着されています。サイズが合わない場合は(S)または(L)サイズのイヤピースに交換してください。

※イヤピースをはずす際は、イヤピース部分を引っ張ってください。装着する際は、奥まで押し込んでください。

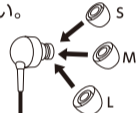

■イヤホンマイクの接続

イヤホンマイクのプラグをイヤリスのイヤホンマイクジャックにしっかりと差し込んでください。

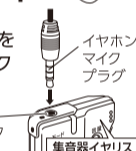

■イヤホンとマイク

を耳に装着



■受話器をマイクに近づける

マイク側の耳に受話器を近づけてお話しください。音量はイヤリス本体で調整します。



仕様

使用ユニット：直径10mm
ユニットインピーダンス：8Ω
プラグ：Φ3.5mm金メッキストレートプラグ
コード長：約0.8m
質量：約10g(コード含む)
付属品：交換用イヤピース(S/M/L、各2個)
交換の際は、当社型番FD-EP(別売)をご使用ください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159

MADE IN CHINA AC140808A



電話の声をキャッチ
声を大きく聴ける!



メーカーNo. 1308-0

電話用
集音器イヤリス専用
AS-P001

電話での会話を
自然に快適に

- 自然な持ち方で電話
できる耳穴式イヤホン
- 日常生活でも使用
できるイヤホンイヤリス
- 不快なピーピー音が
分離しやすい分離型

●コートを着るときには必ずイヤホン部分をしっかりと抜いてください。断線や事故の原因となります。
●本品をご使用中にお肌に合わないと感じた場合には、使用を中止し、医師へご相談ください。
●イヤホンマイクは撥水に取付してください。使用中にイヤホンマイクに水滴がつかないようにご注意ください。
●イヤホンマイクを長時間にわたって使用すると、イヤホンマイクの部分が熱くなり、イヤホンマイクが壊れる場合があります。イヤホンマイクを長時間にわたって使用しないようにご注意ください。

使用上の注意